



# PROFESSIONAL@home SCHNELLEDESINFEKTION

- Parfümfrei
- Wirksam gegen Noroviren
- Gute Material- und Hautverträglichkeit



Vor Gebrauch Etikett lesen.

## Produktbeschreibung

PROFESSIONAL@home SCHNELLEDESINFEKTION ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Das Produkt ist insbesondere für die Küche und den Haushalt geeignet. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt eine sehr gute Materialverträglichkeit auf. Eine ausgezeichnete Ergänzung bilden die PROFESSIONAL@home Desinfektionstücher zur allgemeinen Desinfektion von Flächen, Händen und Haut.

## Anwendungsgebiete

### GEM. BIOZIDPRODUKTE- VERORDNUNG (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, auch im Bereich von Küche und Haushalt.

### GEM. EU-MEDIZINPRODUKTE VERORDNUNG:

Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven, alkoholbeständigen Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

## Anwendung

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und diese über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

## Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ZUR FLÄCHENDESINFEKTION:

Anwendungsempfehlung:	
Bakterizid, levurozid:	2 min
tuberkulozid (M. terrae):	30 s
mykobakterizid (M.avium):	1 min
begrenzt viruzid:	1 min
begrenzt viruzid PLUS:	3 min

Ergänzende Prüfergebnisse:	
wirksam gegen Coronaviren:	30 s
wirksam gegen Noro- und Adenoviren:	3 min

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

## Anwendungshinweise

PROFESSIONAL@home SCHNELLEDESINFEKTION kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

## Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

CE 0482

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



BAuA Reg. Nr. N-94529





## Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

# PROFESSIONAL@HOME SCHNELLEDESINFEKTION

### Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA), Aluminium.

Die Anwendung ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Messing und Polyethylenterephthalat (PET).

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
PROFESSIONAL@home SCHNELLEDESINFEKTION	Rundflasche	100 ml	30	01-323DS-001	16893307
	Sprühflasche	250 ml	20	01-323DS-0025	16812616
	Triggerflasche	750 ml	6	01-323DS-0075	16893336

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

